

# QUATBIO

## Desinfetante Hospitalar Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUATBIO é um desinfetante à base de Quaternário de Amônio, desenvolvido para o uso hospitalar, incluindo áreas críticas, como exemplo: centros cirúrgicos, centro obstétrico, UTI, UTI Neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, entre outras. Em áreas semicríticas, como: enfermaria, apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de triagem, etc. Em áreas não críticas, como: almoxarifados, vestiários e áreas administrativas. QUATBIO é indicado também para laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, odontológicas, de estéticas e veterinárias. É ideal para desinfecção de superfícies fixas, tais como, pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras e afins. Em artigos não críticos, como, termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc. QUATBIO tem ação bactericida e bacteriostática, agindo com eficácia sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Possui laudos que comprovam sua ação de desinfecção contra as bactérias *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase* (KPC).

### INSTRUÇÕES DE USO

**Desinfecção Hospitalar em superfícies fixas:** Diluir o produto em 1:30 partes de água. Aplicar a solução diluída diretamente na superfície com o auxílio de um pulverizador, mop aplicador ou outra ferramenta apropriada. Espalhe a solução com esponja ou pano, de modo a umectar completamente toda a área a ser desinfetada. Mantenha a superfície ou artigo úmidos com a solução pelo tempo de 10 minutos. Não misturar com cloro ou outros produtos. Não precisa enxaguar.

**Desinfecção Hospitalar em artigos não críticos:** Diluir o produto 1:30 partes de água. Imergir os artigos no produto diluído pelo tempo de 10 minutos. Não misturar com cloro ou outros produtos. Realize o enxágue se necessário e utilize-os o mais breve possível.

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Aparência: líquido transparente incolor a levemente amarelado e de odor característico  
pH: 6,0 – 8,0  
Teor de ativos: 10,0 – 20,0 %  
Densidade (20/25°C): 0,970 – 1,010 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidade: 10 – 30 cps

### REGISTRO NA ANVISA Nº 325930034

### SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE QUATBIO

Hospitais, clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios de patologia, etc.